



本品は通常の救急ばんそうこうとは異なります。ご使用前に当説明書をよく読んで正しくご使用ください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

医療用品 (4) 整形用品
管理医療機器 家庭用創傷パッド JMDN コード:71025000

モイスジェルケア

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 適用対象 (患者)

傷の悪化、治癒が遅れる場合がありますので、次のような部位には使用しないでください。

- ・感染が見られる傷 (赤くなり、熱、腫れ等の異常が認められる傷。膿を持っている傷。)
- ・深い刺し傷、筋肉・骨・腱がみえるような深い傷。
- ・人または動物にかまれた傷。
- ・木片、ガラス、砂、ほこり、繊維屑などの異物が入り込んだ傷。
- ・すでにかさぶたができている傷。
- ・にきび、湿疹、発赤、虫さされ、皮膚炎などの症状。
- ・目の周囲、粘膜。

形状・構造及び原理等

*1. 形状及び構造

本品は、軽度の創傷等を保護するために用いる粘着テープ付きの滅菌済み創傷パッドです。はぎ取りテープ、キャリアフィルム、粘着テープ、創傷パッド及び剥離紙で構成され、滅菌包装されています。

治癒の促進


ハイドロコロイド
創傷パッド

体液(治す成分)を
保持する

はがれにくく
肌になじしい

厚さ0.01mm
高伸縮フィルム

(低刺激性粘着剤使用)

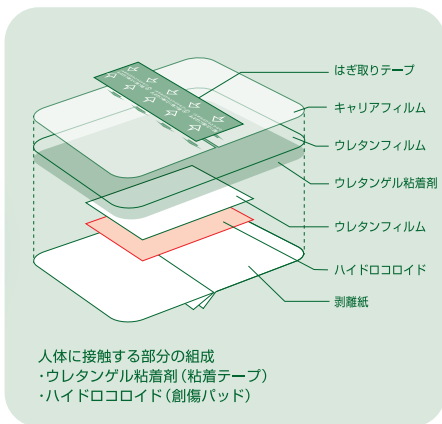

滅菌済医療機器

サイズ及び入数は包装表面に記載しています。

2. 原理

ハイドロコロイドの創傷パッドが創傷面を被覆し保護します。ハイドロコロイドが創傷からの滲出液を吸収し、治癒に最適な湿潤環境を維持することにより、痛みの軽減、及び治癒の促進を図ります。また、粘着テープは、創傷パッドを創傷面に固定し、外部からの汚染を防ぎます。

使用目的又は効果

軽度の切り傷、擦り傷、刺し傷、かき傷、靴ずれ等の創傷や軽度の熱傷を保護する。湿潤環境を維持し、痛みの軽減や治癒促進を図る。

使用方法等

*《貼付前》


- 1) 本品を貼付する創傷が、感染(発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭などの異常)していないことを確認してください。
- 2) かさぶたが出ていないことを確認してください。
- 3) 密着性の低下及び傷の治りを遅らせることがありますので、殺菌・消毒剤や軟膏・クリーム等は本品と併用しないでください。使用した場合は、水道水などでよく洗い流してください。
- 4) 創傷面及びその周囲を水道水などでよく洗浄し清潔にしてください。特に、木片、ガラス、砂、ほこり、繊維屑などの異物が残らないようにしてください。洗浄後は、水気をよく拭き取ってから本品を貼付してください。
- 5) 創傷パッドよりも大きな傷には使用しないでください。
- 6) 滲出液の多い傷には使用しないでください。



*《貼付時》

- 1) 滅菌包装を開封し、本品を取り出します。
裏面の平らな剥離紙(1)をはがし、創傷パッドが創傷面の中央にくるようにあて、軽くおさえながら貼付してください。
 - 2) 残りの折り返しのある剥離紙(2)をはがし、粘着テープは伸ばさずに貼ってください。引っ張った状態で貼付すると皮ふ障害の原因となるためご注意ください。
 - 3) 次に、はぎ取りテープをつかみ(3)、キャリアフィルムをゆっくりと矢印方向にはぎ取ってください。
 - 4) 最後に、残りのキャリアフィルムを矢印方向にはぎ取り、創傷パッド周囲にシフ、残りが無いようにしっかりおさえつけて密着させてください。
- ** 5) パッドにスジやムラがみられることがあります。製造過程で生じるもので品質上問題ありません。
- ** 6) パッドに白っぽい粒がみられることがあります。原料由来のもので品質上問題ありません。

(貼り方)

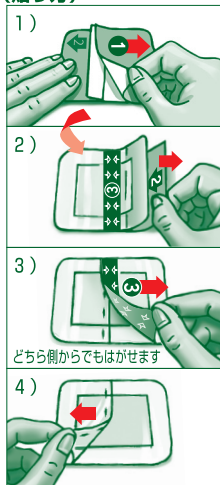

<貼付中>

- 1) 少なくとも2〜3日に1回は創傷面の状態を観察し、感染の兆候がないことを確認してください。観察後は、新しい製品に貼りかえてください。
- 2) 感染(発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭などの異常)の兆候が認められた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 3) 創傷パッドからの滲出液の漏れ、粘着テープのはがれ、汚れなどが認められた場合は、新しい製品に貼りかえてください。

<はがす時・貼りかえる時>

- 1) はがす時は、創傷面や周囲の皮ふへの負担をおさえるため、皮ふをおさえ体毛の流れに沿ってゆっくりとはがしてください。
- 2) はがした際に、創傷パッドが創傷面に残ることがあります。残った創傷パッドは、水道水などで洗い流してください。

使用上の注意

1. 重要な基本的注意

- ** 1) 定められた使用方法を守って使用してください。
- ** 2) 3歳未満の乳幼児には使用しないでください。
また、小児に使用させる場合は、保護者の監督のもとで使用してください。
- 3) 本品を切って使用しないでください。
- ** 4) 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
・糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
・強い倦怠感を感じていたり、発熱があるなど全身状態がよくない人。
・アレルギー体質の人や、薬や絆創膏などで発疹などの過敏症状を経験した事のある人。
- 5) 次の場合は、使用を直ちに中止し、医師の診察を受けてください。
・本品の使用により、傷の悪化、化膿、感染(発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、痛み、悪臭などの異常)、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合。

- ・出血を伴う火傷、患部が変色して患部の感覚がない場合。
・本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等を生じた場合。
・貼りかえながら、数日間使用してもよくなる場合。
・はがした際に、臭いがあり淡黄色の粘りがある膿のようなものがあり、その周囲が赤くはれている場合。
- 6) 滲出液が漏れたり、パッド部分が汚れたりはがれたりした場合は、本品をはがし、水道水などでよく傷を洗浄した後、新しいものに貼りかえ、傷口を清潔に保ってください。

2. その他の注意

- 1) 本品は強くこすれたり、過度な発汗や運動で隙間ができたり、水仕事、入浴、プールなどで皮ふがふやけた場合には、はがれやすくなります。
- 2) 患部の状態や個人の体質によっては、治癒後色素沈着や傷跡が残る場合があります。

保管方法及び有効期間等

- ① 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 使用の期限：使用期限は包装裏面に記載しています。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

*製造販売業者

*販売業者

 **リテープ製薬株式会社**
熊本県熊本市北区植木町野野 45
TEL 096-272-0631

 **白十字株式会社**
〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12
お客様相談室 ☎0120-01-8910
受付時間/9:00~17:00(月~金) 祝日を除く
* <https://www.hakujuji.co.jp>