


閉鎖式コネクタ(混注部)の消毒方法

- 閉鎖式コネクタ(混注部)は混注前又は採血前に、必ず混注部を消毒用アルコールを含ませた酒精綿等で消毒してください
- 酒精綿等を用いた閉鎖式コネクタ(混注部)の消毒方法



2分割ラインに沿って開封

2分割ラインに沿って分割します。

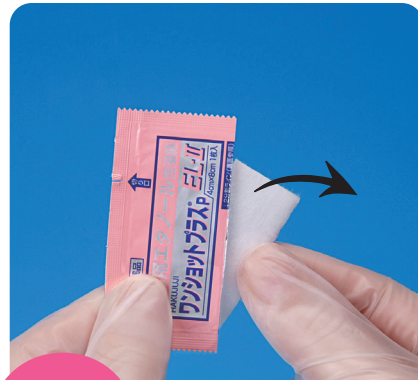

1枚ずつ袋から取り出す

1枚ずつ清拭に使用します。
2人の患者様に使用するためのものではありません。
開封後は時間をおかず、すみやかにご使用ください。



1回目 汚れの除去

1枚目で汚れを落とすように1kg*の力で1方向に1直線に清拭します。¹⁾

※圧迫止血する程度の力



2回目 消毒

2枚目は消毒目的として2回目の清拭をします。¹⁾

覚え方

閉鎖式コネクタ(混注部)の消毒方法は **1・2 !!**

直線 回清拭



クローズド輸液システム
シユアプラグ® AD シリーズ

一般的名称 輸血・カテーテル用アクセサリセット
販売名: シユアプラグAD
医療機器認証番号: 229AABZX00004
販売名: シユアプラグADマニフォールド
医療機器認証番号: 229AABZX00005
一般的名称 輸液ポンプ用ストップコック
販売名: シユアプラグAD三方活栓
医療機器認証番号: 225AABZX00139

一般的名称 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
販売名: シユアプラグAD輸液セット
医療機器認証番号: 225AABZX00142
一般的名称 輸液ポンプ用延長チューブ
販売名: シユアプラグAD延長チューブ
医療機器認証番号: 225AABZX00143

TERUMOはテルモ株式会社の商標です。
シユアプラグはテルモ株式会社の登録商標です。

TERUMO テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
www.terumo.co.jp ©テルモ株式会社 2018年7月18日H020

P EL-II
15th
anniversary



HAKUJUJI
ワンショットプラス P EL-II
10cm×80ml1取



白十字株式会社 〒171-8552 東京都豊島区高田3-23-12
http://www.hakujuji.co.jp

2分割ラインを活用した場合、
1袋で2回清拭が可能

第3類医薬品 外用消毒剤
販売名: HAKUJUJI ワンショットプラス P EL-II
効能・効果: 手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒
承認番号: 21500APZ00644000

参考文献



1) Journal of Hospital Infection Available online 21 March 2018, "Scrubbing" technique for needleless connectors to minimize contamination risk